

**Artikelnummer: A1090**  
**ARA-Automatischer Rufauslöser**

[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)



## BEDIENUNGSANLEITUNG

**ARA - Automatischer Rufauslöser zur Sturzprävention**

**Artikelnummer: A1090**  
**ARA-Automatischer Rufauslöser**




Der Automatische-Ruf-Auslöser (ARA) dient zur Rufauslösung, wenn sich Personen im Sicherungsbereich vor dem Melder bewegen, ein idealer Ersatz für Kontakt-Trittmatten

Der ARA ist für den Anschluss an eine vorhandene Rufanlage vorgesehen

Aufstellungsort in ca. 30 cm bis 1,2 Meter Höhe

Erfassungsweite ca. 5 Meter

Erfassungsbereich 80 Grad horizontal

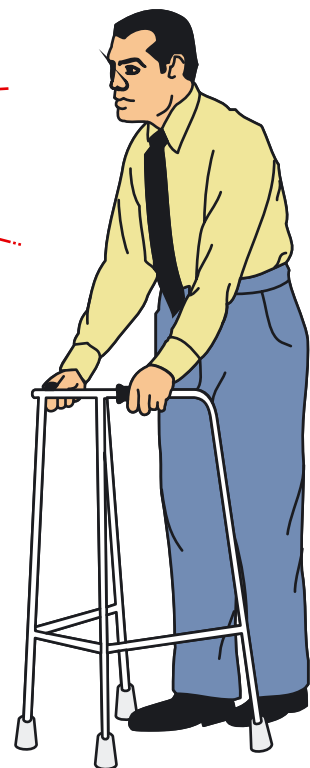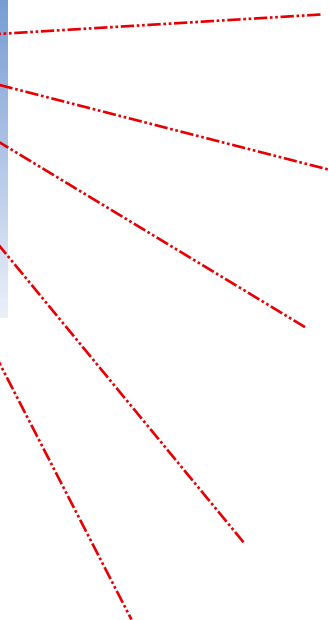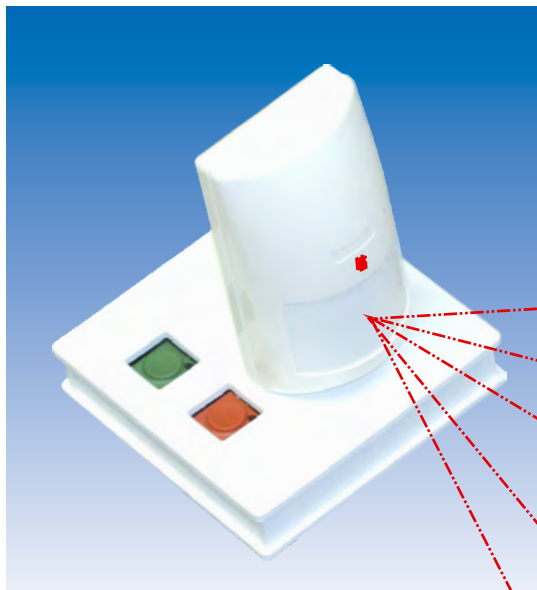

Bearbeiter: J. Witte, 02.07.10	Geprüft: B. Gutgesell, 02.07.10	Freigegeben: B. Gutgesell, 02.07.10	Revision: 2	Datei: A1090	Seite 2 von 8
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------	--------------	---------------


## Artikelnummer: A1090

### ARA-Automatischer Rufauslöser

[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)

#### INBETRIEBNAHME

##### Begriffserläuterung

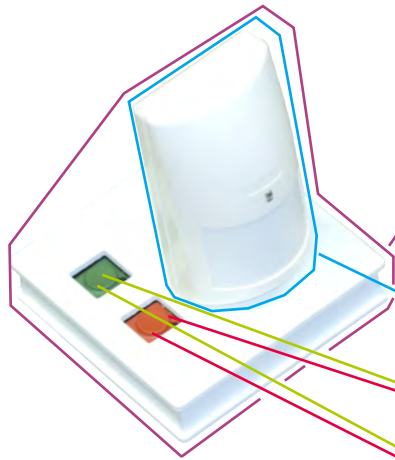


- ARA-Automatischer Rufauslöser - gemeint ist damit das komplette Gerät.
- IR-Melder - gemeint ist nur der IR-Melder, einschließlich der rot/orangen Leuchte, der "Auslöseleuchte", nicht der komplette ARA.
- Grüne bzw. Rote Lampe - gemeint sind die Tastenbeleuchtungen.
- Die grüne und die rote Taste.



##### Nach dem "Auspacken"

ARA im ausgeschalteten Zustand.

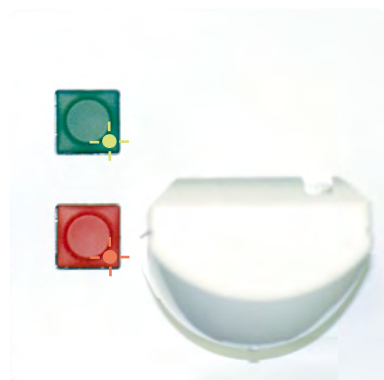

##### Einschalten

ARA über das Westernmodulkabel mit der Schwesternrufanlage verbinden.

Nach dem einschalten des ARA, (Netzteil mit ARA und Steckdose verbinden), blinken beide Lampen für ca. 20 Sekunden bis zu 3 Minuten.

Nach dieser "Warmlaufphase" ist der ARA Betriebsbereit.



##### Ruhezustand

Der ARA schaltet auf grünes Dauerlicht (5 Sekunden an, 0,1 Sekunden aus) und ist nun Betriebsbereit, also Rufbereit.

## Artikelnummer: A1090

### ARA-Automatischer Rufauslöser

[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)

#### INBETRIEBNAHME



#### Der IR (Infrarot-Melder) im ARA


Der IR-Melder im ARA schaltet sich ein, sobald sich eine Person im Empfangsbereich bewegt, die rot/orange Lampe am IR leuchtet auf.

#### Wichtig!

Ein aufleuchten der Lampe am IR-Melder (nicht eine der Tastenleuchten), bedeutet noch keine Rufauslösung, sondern nur ein "ansprechen" des IR-Melders.



Ein Ruf zur Schwesternrufanlage wird unter den nun folgenden Voraussetzungen geschaltet.

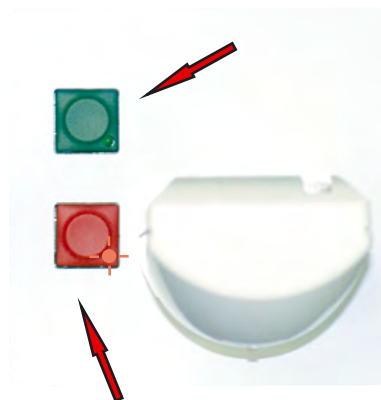

#### Auslösung

Wenn sich jetzt eine Person in den Auslösebereich des ARA bewegt, löst der ARA aus, die rote Lampe geht kurz auf Dauerlicht, dann auf Blinklicht.

Über den Ausgang des ARA wird ein Ruf geschaltet, der über die Kabelverbindung an die Schwesternrufanlage weitergegeben wird (Kontakt wird für 1,5 Sekunden geschaltet, danach 20 Sekunden "Zwangspause").

Die rote Ruflampe geht aus.

## Artikelnummer: A1090

### ARA-Automatischer Rufauslöser


[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)

#### PFLEGE



##### Vor der Pflege

Der ARA befindet sich im betriebsbereiten Ruhezustand - grünes Dauerlicht - durch drücken der grünen Taste, wird die Rufauslösung ausgesetzt bzw. Unterbrochen.

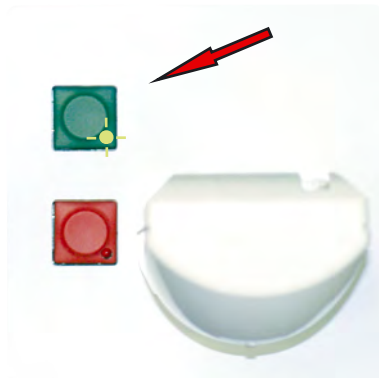

##### Während der Pflege

Die grüne Lampe blinkt nachdem sie gedrückt worden ist, es wird jetzt kein Ruf zur Schwesternrufanlage ausgelöst.

#### WICHTIG!

Das Ausschalten während der Pflege, ist KEIN dauerhaftes Ausschalten des ARA - ein automatisches Einschalten findet auf jeden Fall statt (nach der voreingestellten Zeit).

Weitere Informationen: Siehe "Ausphase".



##### Nach der Pflege - Manuelle Wiedereinschaltung

Erneut die grüne Taste drücken.

Der ARA schaltet auf grünes Dauerlicht und ist nun, wieder, betriebsbereit.

##### Nach der Pflege - Automatische Wiedereinschaltung

Der ARA schaltet sich nach einer (programmierten) Zeit automatisch wieder ein (siehe "Ausphase").

Diese Zeitspanne bis zur automatischen Wiedereinschaltung beginnt immer wieder neu, wenn sich eine Person in den IR-Melder Bereich begibt und der IR-Melder auslöst (nur der IR-Melder, nicht der ARA).

Nach einer Zeit ohne Auslösung des IR-Melders, schaltet sich der ARA automatisch wieder ein.

Der ARA schaltet auf grünes Dauerlicht und ist nun, wieder, betriebsbereit.

## Artikelnummer: A1090

### ARA-Automatischer Rufauslöser

[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)


### Einstellen der Pflegezeitphase/„Ausphase“


#### Vorbereitung

Der ARA befindet sich in der Phase „Rufbereit“.

Die grüne Taste steht auf Dauerlicht.

Leitung zur Schwesternrufanlage trennen bzw. Westernmodularstecker am ARA abziehen.

Die Verbindung zum Stromnetz bleibt bestehen.

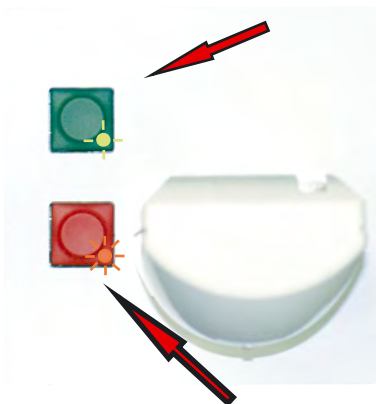

#### Ausführung

Die rote Taste am ARA drücken und gedrückt halten.


Die grüne Lampe blinkt.

Die rote Taste blinkt sehr schnell.

Mit jedem Druck auf die grüne Taste, erhöht sich die Dauer der „Ausphase“ um 30 Sekunden, beginnend bei 30 Sekunden.

1. Druck 30 Sekunden
2. Druck 1 Minute
3. Druck 1 Minute 30 Sekunden

.....

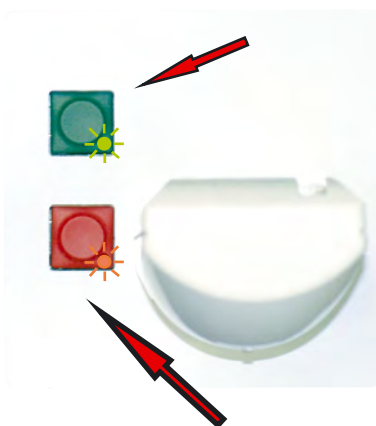

Diese Einstellung bleibt gespeichert, auch bei Trennen des ARA vom Stromnetz.

#### WICHTIG!


Die „Ausphase“ führt nicht zum kompletten Ausschalten des ARA - ein automatisches Einschalten findet auf jeden Fall statt (nach der voreingestellten Zeit).

Dauerhaftes Ausschalten des ARA, funktioniert nur über Trennung vom Stromnetz. Sie können auch die Verbindung zur Rufanlage trennen.

Es ist kein gesonderter Ausschalter vorhanden, das dient auch der „Sabotage-Prävention“.

# Artikelnummer: A1090

## ARA-Automatischer Rufauslöser

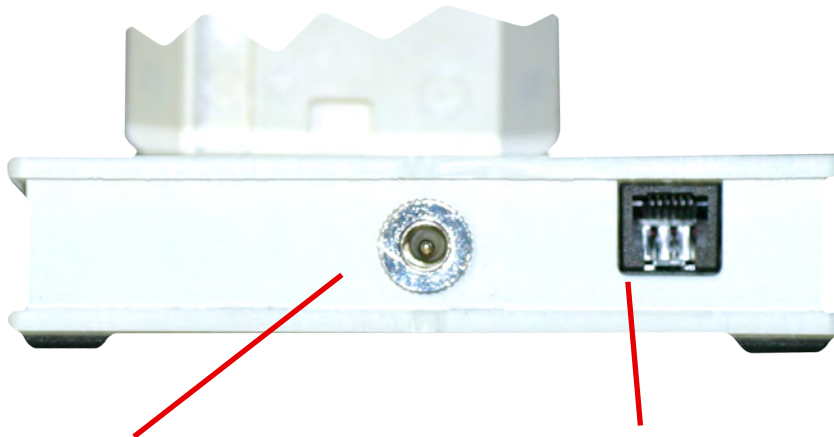[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)

Verbinden Sie diese Buchse mit dem Netzteil.

Anschluss des ARA an die Schwesternrufanlage, über Westernmodularsteckverbindung.

### Achtung!

Arretierung des Steckers beachten.

Diese ist beim Herausziehen herunterzudrücken.

Beim Reinstecken rastet sie selbsttätig ein.



**GUT GESELL**

**GUTGESELL GmbH**  
**Arenskule 9A**  
**21339 Lüneburg**  
**Deutschland**  
**Tel: 04131 40 47 33**  
**Fax: 04131 40 47 34**  
**[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)**  
**[info@gutdat.de](mailto:info@gutdat.de)**

