

# Bett-Taster, BT-LÜ

## BEDIENUNGSANLEITUNG

inklusive Justierung bzw. „einlernen“ eines Zimmers



Artikelnummer: 1099  
Bett-Taster, BT-LÜ

[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)

Handgerät zur Rufauslösung

- Selbstüberwachung / Rausziehalarm entspr. DIN0834
- Leitungsüberwachung, diagnostiziert Kurzschluß und Leerlauf
- Funktion: NORMALRUF
- große rote Ruftaste (19x19mm)
- angenehme Bedienung durch abgerundete Kanten
- Ruflicht mit roter LED (wartungsarm)
- 2,5m flexible Anschlussleitung
- andere Leitungslängen problemlos realisierbar
- geringste Folgekosten durch preiswerte Westertechnik
- Farbe: weiss
- Maße: 40x90x25mm (BxHxT)



Bearbeiter: JW, 04.07.13	Geprüft: BG, 04.07.13	Freigegeben: BG, 04.07.13	Revision: 1	Datei: A1099_PBG	Seite 1 von 1
--------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	------------------	---------------

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Logos, Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

## Artikelnummer: 1099 Bett-Taster, BT-LÜ

[www.gutdat.de](http://www.gutdat.de)

### Anwendung und Zweckbestimmung:

Das Gerät darf nur in dafür vorgesehenen und vom Hersteller freigegebenen Anlagen betrieben werden. Das Gerät muss zyklisch überprüft werden.

### Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung 17-30V, soll 24V  
Stromaufnahme <1mA (Ruhe), 20mA (Aktiv)  
Schaltlast für externen Kontakt max: 30VDC, 24VAC, 200mA  
Einsatz in trockenen Räumen  
Umgebungstemperatur: 0-40°C

### Reinigungshinweis:

Die Reinigung darf nur über ein leicht befeuchtetes Tuch erfolgen. Reinigungsmittel darf nicht direkt aufgetragen oder aufgesprüht werden und muss lösungsmittelfrei sein.

### Warnhinweis:

Arbeiten an dem Gerät sind ausschließlich von eingewiesenen Personen durchzuführen.



### Aktion

Rote Taste wird betätigt

Rote Taste wird betätigt bei vorheriger Anwesenheit

Der Taster wird aus der Dose gezogen oder ist beschädigt.

Frage: Wie bekomme ich eine Störmeldung wieder weg?

Antwort: Störmeldung werden durch Behebung der Störung (z. B. Austausch des Tasters) oder durch neue Justierung des Zimmers behoben. Die Justierung kann von der Zentrale oder vom Abstelltaster im Zimmer erfolgen.

Frage: Wie justiere (einlernen) ich im Zimmer das Zimmer neu?

Antwort: Die Anwesenheits-Abstelltaste (grüne Taste) am AT oder RAT drücken und halten (es dauert ca. 10 bis 15 Sekunden bis zum Beginn des Justierungsvorgangs). Durch schnelles Blinken und Piepen wird der Justierungsvorgang angezeigt. Taste loslassen und abwarten bis das Blinken und Piepen aufhört, **(bitte bis zum Ende abwarten, es hört kurzzeitig auf und fängt dann wieder an)**. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden. Danach drei- bis fünfmal kurz die Anwesenheits-Abstelltaste drücken, bis der RAT oder AT wieder im Normalbetrieb ist.

Frage: Wie tausche ich eine defekte Leitung am Taster aus?

Antwort: Die Befestigungsglasche am Western-Plug drücken und gleichzeitig an der Leitung ziehen. Die neue Leitung einfach einstecken. Fertig!

### Reaktion

Es wird ein Ruf ausgelöst  
Die rote Lampe leuchtet.

Es wird ein Assistenzruf ausgelöst.  
Die rote Lampe blinkt schnell.

Es wird nach kurzer Zeit (5sec) eine Störmeldung durch Leitungsüberwachung erzeugt und angezeigt.

Bearbeiter: JW, 04.07.13	Geprüft: BG, 04.07.13	Freigegeben: BG, 04.07.13	Revision: 1	Datei: A1099_BWG	Seite 1 von 1
--------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	------------------	---------------

