

FLEXI-Funk

BEDIENUNGSANLEITUNG TASTER / SENDER



GUTGESELL GmbH
Arenskule 9A
21339 Lüneburg
Deutschland
Tel: 04131 40 47 33
Fax: 04131 40 47 34
www.gutdat.de
info@gutdat.de

DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert

Artikelnummer: 1005 / 1066

FLEXI-Mini-Sender (1005) / FLEXI-Mini-Sender QA (1066)

www.gutdat.de

Kleiner Funkruftaster im FLEXI-Systemfunk. Durch den eingebauten Sender und Empfänger ermöglicht der FLEXI-Systemfunk ein Höchstmaß an Sicherheit.

- 1 rote Taste zur Rufauslösung
- 1 robuster Magnetschalter zur Rufquittierung (**nur 1066**)
- optische Bestätigung durch LED
- automatische Sendewiederholung bis zur Quittierung durch Empfänger
- automatisch neues Einbuchen / Routing bei Standortwechsel oder schwachen Empfang
- sichere Übertragung auch bei zeitgleicher Übertragung durch Kollisionskontrolle
- Batteriekontrolle mit Alarmmeldung auf Zentrale
- Betrieb mit Knopfzellen 2 x CR2016 Batterie
- RISC-Controller
- Frequenz 868MHz
- postzugelassen und gebührenfrei
- Lieferumfang: FLEXI-Mini-Sender, 2 x Batterie, Schlüsselring + Sicherheitskordel
- Farbe: schwarz oder weiss
- Maße ca: 53x37x20mm (BxHxT)



A1163 - Halskette Kordel, schwarz mit Sicherheitsverschluss

Bearbeiter: J. Witte, 16.02.11	Geprüft: B. Gutgesell, 16.02.11	Freigegeben: B. Gutgesell, 16.02.11	Revision: 2	Datei: FLEXIFunk_BK58	Seite 3 von 8
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------

Artikelnummer: 1005 / 1066

FLEXI-Mini-Sender (1005) / FLEXI-Mini-Sender QA (1066)

Der FLEXI-Mini-Sender verfügt über nebenstehende Tasten und Lampen.

Anhand der Tasten können unterschiedliche Rufe ausgelöst werden.



Rufart	Ereignis	Anzeige
normaler Ruf	Betätigung der roten Ruftaste	LED blinkt rot
Abstellruf	Magnet wird an der oberen Seite vorbei geführt	LED blinkt grün
Notruf	Ruftaste gedrückt halten, Magnet wird an der oberen Seite vorbei geführt	LED blinkt rot, LED blinkt einmal grün



Wichtiger Wartungshinweis!

Die Batterien sind einmal jährlich zu wechseln.

Es sind ausschließlich Lithium Zellen 2 x CR2016 zu verwenden.

Die Batterien sind unter die „Lasche“ des Batteriehalters zu schieben (siehe Bilder, roter Pfeil).

PLUSpol liegt bei beiden Batterien oben.

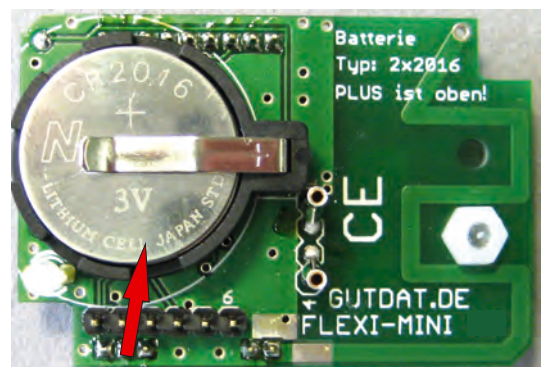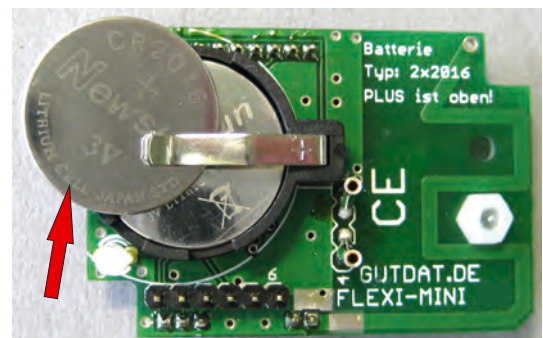

Artikelnummer: 0692 - 0547 - 1009 - 1010
FLEXI Funk-Großflächentaster FLEXI-GFT

Extra großer Funkruftaster im FLEXI-Systemfunk. Durch den eingebauten Sender und Empfänger ermöglicht der FLEXI-Systemfunk ein Höchstmaß an Sicherheit.

FLEXI-GFT (0692)

- 1 grosse rote Taste zur Rufauslösung
- optische Bestätigung durch LED
- akustische Bestätigung durch Summer
- automatische Sendewiederholung bis zur Quittierung durch Empfänger
- automatisch neues Einbuchen / Routing bei Standortwechsel oder schwachen Empfang
- sichere Übertragung auch bei zeitgleicher Übertragung durch Kollisionskontrolle
- Batteriekontrolle mit Alarmmeldung auf Zentrale
- Betrieb mit handelsüblicher 9V Block-Batterie
- RISC-Controller
- pflegeleichte Frontfolie
- Frequenz 868MHz
- postzugelassen und gebührenfrei
- Lieferumfang: FLEXI Funk-Großflächentaster, Batterie
- Farbe: weiss (creme)
- Maße ca: 65x120x22mm (BxHxT)

FLEXI-GFT QA (0547) / (Spezifikationen zusätzlich zum FLEXI-GFT)

- 1 robuster Magnetschalter zur Rufquittierung
- Assistenzruf durch zeitgleiches Rufen und Quittieren

FLEXI-GFT QA IP (1009) / (Spezifikationen zusätzlich zum FLEXI-GFT)

- IP 64 "Spritzwasserdicht"
- 1 robuster Magnetschalter zur Rufquittierung
- Assistenzruf durch zeitgleiches Rufen und Quittieren

FLEXI-GFT QAN Western (1010) / (Spezifikationen zusätzlich zum FLEXI-GFT)

- 1 Nebensteckkontakt zur Aufnahme externer Rufauslöser
- 1 robuster Magnetschalter zur Rufquittierung
- Assistenzruf durch zeitgleiches Rufen und Quittieren

optionale
Westernbuchse



Bearbeiter: J. Witte, 16.02.11	Geprüft: B. Gutgesell, 16.02.11	Freigegeben: B. Gutgesell, 16.02.11	Revision: 2	Datei: FLEXIFunk_BK58	Seite 5 von 8
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------

Artikelnummer: 0692 - 0547 - 1009 - 1010
FLEXI Funk-Großflächentaster FLEXI-GFT

Der FLEXI Funk-Großflächentaster (FLEXI-GFT) verfügt über nebenstehende Tasten, Buchsen (Versionsabhängig) und Lampen.

Anhand der Tasten können unterschiedliche Rufe ausgelöst werden.

Jeder Ruf wird durch die Lampen (optisch) und einen Buzzer (akustisch) angezeigt.

Lampe für Rufanzeige (rote LED)



grosse rote Ruftaste

Rufart	Ereignis	Anzeige
normaler Ruf	Betätigung der roten Ruftaste	LED blinkt, Buzzer ertönt
Abstellruf	Magnet wird an der linken Seite vorbei geführt	LED blinkt, Buzzer ertönt
Notruf	Ruftaste gedrückt halten, Magnet wird an der linken Seite vorbei geführt	LED blinkt, Buzzer ertönt



Ein Abstell- oder Notruf überschreibt die Auslösung eines normalen Rufes, aber nicht umgekehrt.


Ein Ruf wird solange gesendet, bis er empfangen wird.

Wichtiger Wartungshinweis!

Die Batterien sind einmal jährlich zu wechseln. Es sind ausschließlich alkalische Batterien zu verwenden. Zum Batteriewechsel auf der Rückseite das Batteriefach aufschrauben und 9V-Block Batterie vom Batterieclip abhebeln.



Nur alkalische Batterien verwenden!

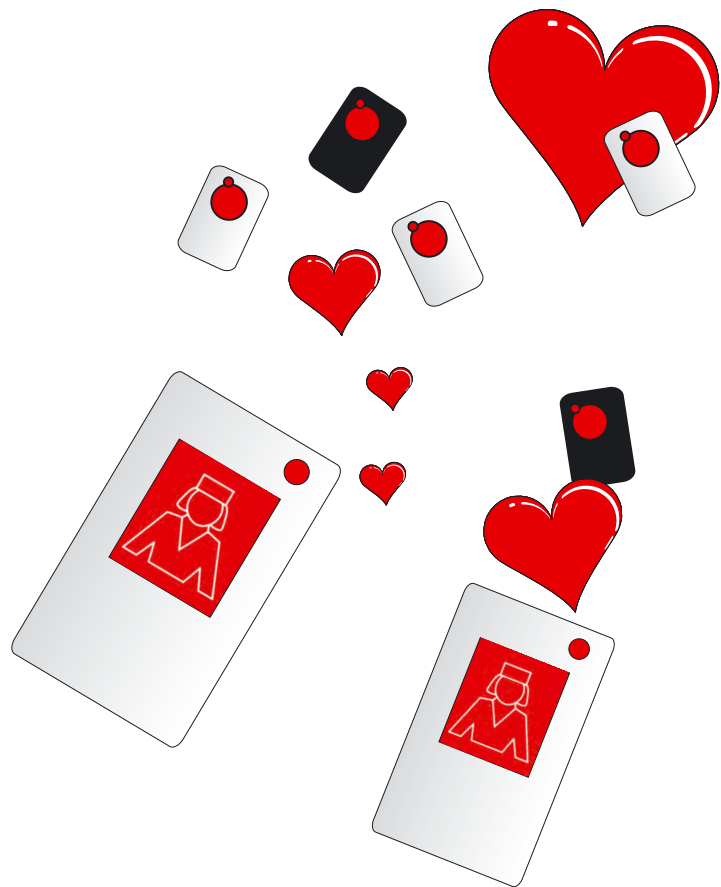

GUTGESELL GmbH
Arenskule 9A
21339 Lüneburg
Deutschland
Tel: 04131 40 47 33
Fax: 04131 40 47 34
www.gutdat.de
info@gutdat.de